

Infrarot-Moxa-Gerät M3



Moxatherapie ohne Geruchsbelästigung!

für die Behandlung von Akupunktur- und Schmerzpunkten

Das Infrarot-Moxa-Gerät M3 wirkt:

tiefenwirksam

geruchlos

schnell

sicher

Die Infrarotstrahlung durchdringt die Haut und erwärmt tieferliegende Schichten.



Zum Vergleich: beim Abbrennen von Moxazigarren oder Moxakegeln wird nur die Hautoberfläche erhitzt. Akupunkturpunkte in der Tiefe werden nicht erreicht und somit nicht (ausreichend) therapiert. Außerdem birgt das Hantieren mit Feuer am Patienten doch einige Gefahren in sich.


Anwendungsmöglichkeiten des Infrarot-Moxa-Gerätes M3:

- Erkrankungen, die durch Kälte ausgelöst oder verschlimmert werden
- Erkrankungen, die mit Kältegefühl einhergehen (Han-Krankheiten)
- Behandlung von Gelenken und Wirbelsäule
- Erkrankungen, die mit Hypofunktion einhergehen
- Magen-Darm-Beschwerden
- Hyposensibilisierung bei Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeit

Die neue Reflektortechnik im M3:

Als **Infrarotquelle** dient im M3 eine mit Unterspannung betriebene Halogenlampe mit intensivem Infrarotanteil. Sie ist im Brennpunkt eines Spezialreflektors justiert, der die Form eines **Rotationsellipsoides** hat. Im anderen Brennpunkt sitzt ein Quarzglas-Lichtleiter, durch den die konzentrierte Infrarotstrahlung herauskommt. Als Stromversorgung dient ein medizintechnisch zugelassenes Netzgerät.

UV-Filtertechnologie: Das mit UV-absorbierenden Substanzen angereicherte Quarzglas der Lampe hält die energiereichen und schädlichen, daher unerwünschten UV-Anteile (UV-C und UV-B Strahlen) weitgehend zurück. Durch den Betrieb mit Unterspannung wird außerdem die Erzeugung dieser Strahlung praktisch vermieden, was dem Anwender doppelte Sicherheit gibt.

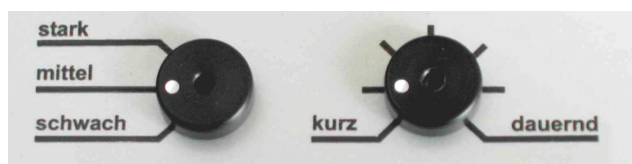

Die Bedienung des Moxa-Gerätes M3 ist sehr einfach:

Mittels zweier Drehknöpfe kann man den Timer (2 Sek. bis dauernd) und die Leistung in **3 Stufen** einstellen, dann die Taste betätigen und schon bestrahlt man den Punkt:

Schwache Leistung: Moxagerät direkt auf Gewebe aufsetzen


Mittlere Leistung: konstanter Abstand Moxagerät - Haut ca. 1-2cm

Starke Leistung: Moxagerät - Haut-Abstand variieren (Vogel-Pick-Technik)

Nach Erreichen der gewünschten Temperatur oder nach Ablauf der eingestellten Therapiezeit einfach die Taste wieder loslassen, und die Infrarot-Strahlung schaltet ab.

Technische Daten	
Lebensdauer der Lampe:	ca. 10.000 Stunden
Stromversorgung	100 bis 240 Volt Netz
Leistungsaufnahme	ca. 8 Watt
Garantie	36 Monate
Abmessungen	Durchmesser 20mm x 190mm
Gewicht ca.	64g

Lieferumfang:	
1 Stk. Infrarot-Moxa-Gerät M3	1 Stk. Spezialnetzgerät
1 Stk. Koffer	1 Stk. Gebrauchsanweisung

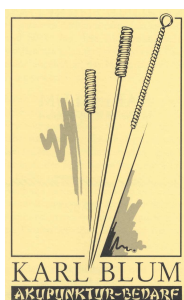

Akupunkturbedarf Karl Blum GmbH
Breslauer Strasse 42
82194 Gröbenzell



Tel: 08142/448480
Fax: 08142/4484820
Mail: info@blum-akupunktur.de
Web: www.blum-akupunktur.de