

## **Bedienungsanleitung**

1. Spender bis Anschlag in Gehäuse schrauben (bis rote Markierung nicht mehr sichtbar).
2. Kolben bis gegen Anschlag aus Spender herausziehen.
3. Kapselhalter bis gegen Anschlag aus Gehäuse schrauben.
4. CarboMed-Kapsel einlegen und Gerät ab jetzt ungefähr senkrecht halten.

Wird Gerät nicht senkrecht gehalten, sondern waagrecht oder sogar überkopf, vereist die Kapsel und das Gerät produziert kein Trockeneis. Die Hand könnte an der Kapsel festfrieren!

5. STARTEN : Kapselhalter ganz in Gehäuse schrauben und Gerät ca. 1 Minute ungefähr senkrecht halten (Kohlensäure entweicht hörbar).
6. Nach ca. 1 Minute, wenn keine Kohlensäure mehr entweicht, Kapselhalter langsam aus Gehäuse schrauben. Gerät muß jetzt nicht mehr senkrecht gehalten werden.
7. Spender aus Gehäuse schrauben.
8. Kolben in Spender hineinschieben, bis gewünschte Trockeneislänge heraussteht.
9. Nach jeder Behandlung den Spender in den Desinfektionsbehälter stellen und desinfizieren. Gebrauchte Lösung nicht mit frischer Desinfektionslösung auffüllen, sondern komplett erneuern.