

# Therapiesets

Non-invasive Laserdiagnose und -therapie

## Frequenzhandbuch



Therapieset Nogier Bahr		
Programmgruppe Nogier	Programmgruppe Bahr	Programmgruppe Bahr
Programme	Programme	Programme
A	Knie	873,00
B	Knie	893,00
C	Knie	913,00
D	Knie	933,00
E	Knie	953,00
F	Knie	973,00
G	Knie	993,00
H	Knie	1013,00
I	Knie	1033,00
J	Knie	1053,00
K	Knie	1073,00
L	Knie	1093,00
M	Knie	1113,00
N	Knie	1133,00
O	Knie	1153,00
P	Knie	1173,00
Q	Knie	1193,00
R	Knie	1213,00
S	Knie	1233,00
T	Knie	1253,00
U	Knie	1273,00
V	Knie	1293,00
W	Knie	1313,00
X	Knie	1333,00
Y	Knie	1353,00
Z	Knie	1373,00
aa	Knie	1393,00
ab	Knie	1413,00
ac	Knie	1433,00
ad	Knie	1453,00
ae	Knie	1473,00
af	Knie	1493,00
ag	Knie	1513,00
ah	Knie	1533,00
ai	Knie	1553,00
aj	Knie	1573,00
ak	Knie	1593,00
al	Knie	1613,00
am	Knie	1633,00
an	Knie	1653,00
ao	Knie	1673,00
ap	Knie	1693,00
aq	Knie	1713,00
ar	Knie	1733,00
as	Knie	1753,00
at	Knie	1773,00
au	Knie	1793,00
av	Knie	1813,00
aw	Knie	1833,00
ax	Knie	1853,00
ay	Knie	1873,00
az	Knie	1893,00
ba	Knie	1913,00
bb	Knie	1933,00
bc	Knie	1953,00
bd	Knie	1973,00
be	Knie	1993,00
bf	Knie	2013,00
bg	Knie	2033,00
bh	Knie	2053,00
bi	Knie	2073,00
bj	Knie	2093,00
bk	Knie	2113,00
bl	Knie	2133,00
bm	Knie	2153,00
bn	Knie	2173,00
bo	Knie	2193,00
bp	Knie	2213,00
bq	Knie	2233,00
br	Knie	2253,00
bs	Knie	2273,00
bt	Knie	2293,00
bu	Knie	2313,00
bv	Knie	2333,00
bw	Knie	2353,00
bx	Knie	2373,00
by	Knie	2393,00
bz	Knie	2413,00
ca	Knie	2433,00
cb	Knie	2453,00
cc	Knie	2473,00
cd	Knie	2493,00
ce	Knie	2513,00
cf	Knie	2533,00
cg	Knie	2553,00
ch	Knie	2573,00
ci	Knie	2593,00
cj	Knie	2613,00
ck	Knie	2633,00
cl	Knie	2653,00
cm	Knie	2673,00
cn	Knie	2693,00
co	Knie	2713,00
cp	Knie	2733,00
cq	Knie	2753,00
cr	Knie	2773,00
cs	Knie	2793,00
ct	Knie	2813,00
cu	Knie	2833,00
cv	Knie	2853,00
cw	Knie	2873,00
cx	Knie	2893,00
cy	Knie	2913,00
cz	Knie	2933,00
da	Knie	2953,00
db	Knie	2973,00
dc	Knie	2993,00
dd	Knie	3013,00
de	Knie	3033,00
df	Knie	3053,00
dg	Knie	3073,00
dh	Knie	3093,00
di	Knie	3113,00
dj	Knie	3133,00
dk	Knie	3153,00
dl	Knie	3173,00
dm	Knie	3193,00
dn	Knie	3213,00
do	Knie	3233,00
dp	Knie	3253,00
dq	Knie	3273,00
dr	Knie	3293,00
ds	Knie	3313,00
dt	Knie	3333,00
du	Knie	3353,00
dv	Knie	3373,00
dw	Knie	3393,00
dx	Knie	3413,00
dy	Knie	3433,00
dz	Knie	3453,00
ea	Knie	3473,00
eb	Knie	3493,00
ec	Knie	3513,00
ed	Knie	3533,00
ee	Knie	3553,00
ef	Knie	3573,00
eg	Knie	3593,00
eh	Knie	3613,00
ei	Knie	3633,00
ej	Knie	3653,00
ek	Knie	3673,00
el	Knie	3693,00
em	Knie	3713,00
en	Knie	3733,00
eo	Knie	3753,00
ep	Knie	3773,00
eq	Knie	3793,00
er	Knie	3813,00
es	Knie	3833,00
et	Knie	3853,00
eu	Knie	3873,00
ev	Knie	3893,00
ew	Knie	3913,00
ex	Knie	3933,00
ey	Knie	3953,00
ez	Knie	3973,00
fa	Knie	3993,00
fb	Knie	4013,00
fc	Knie	4033,00
fd	Knie	4053,00
fe	Knie	4073,00
ff	Knie	4093,00
fg	Knie	4113,00
fh	Knie	4133,00
fi	Knie	4153,00
fj	Knie	4173,00
fk	Knie	4193,00
fl	Knie	4213,00
fm	Knie	4233,00
fn	Knie	4253,00
fo	Knie	4273,00
fp	Knie	4293,00
fq	Knie	4313,00
fr	Knie	4333,00
fs	Knie	4353,00
ft	Knie	4373,00
fu	Knie	4393,00
fv	Knie	4413,00
fw	Knie	4433,00
fx	Knie	4453,00
fy	Knie	4473,00
fz	Knie	4493,00
ga	Knie	4513,00
gb	Knie	4533,00
gc	Knie	4553,00
gd	Knie	4573,00
ge	Knie	4593,00
gf	Knie	4613,00
gg	Knie	4633,00
gh	Knie	4653,00
gi	Knie	4673,00
gj	Knie	4693,00
gk	Knie	4713,00
gl	Knie	4733,00
gm	Knie	4753,00
gn	Knie	4773,00
go	Knie	4793,00
gp	Knie	4813,00
gq	Knie	4833,00
gr	Knie	4853,00
gs	Knie	4873,00
gt	Knie	4893,00
gu	Knie	4913,00
gv	Knie	4933,00
gw	Knie	4953,00
gx	Knie	4973,00
gy	Knie	4993,00
gz	Knie	5013,00
ha	Knie	5033,00
hb	Knie	5053,00
hc	Knie	5073,00
hd	Knie	5093,00
he	Knie	5113,00
hf	Knie	5133,00
hg	Knie	5153,00
hh	Knie	5173,00
hi	Knie	5193,00
hj	Knie	5213,00
hk	Knie	5233,00
hl	Knie	5253,00
hm	Knie	5273,00
hn	Knie	5293,00
ho	Knie	5313,00
hp	Knie	5333,00
hq	Knie	5353,00
hr	Knie	5373,00
hs	Knie	5393,00
ht	Knie	5413,00
hu	Knie	5433,00
hv	Knie	5453,00
hw	Knie	5473,00
hx	Knie	5493,00
hy	Knie	5513,00
hz	Knie	5533,00
ia	Knie	5553,00
ib	Knie	5573,00
ic	Knie	5593,00
id	Knie	5613,00
ie	Knie	5633,00
if	Knie	5653,00
ig	Knie	5673,00
ih	Knie	5693,00
ii	Knie	5713,00
ij	Knie	5733,00
ik	Knie	5753,00
il	Knie	5773,00
im	Knie	5793,00
in	Knie	5813,00
io	Knie	5833,00
ip	Knie	5853,00
iq	Knie	5873,00
ir	Knie	5893,00
is	Knie	5913,00
it	Knie	5933,00
iu	Knie	5953,00
iv	Knie	5973,00
iu	Knie	5993,00
iv	Knie	6013,00
iu	Knie	6033,00
iv	Knie	6053,00
iu	Knie	6073,00
iv	Knie	6093,00
iu	Knie	6113,00
iv	Knie	6133,00
iu	Knie	6153,00
iv	Knie	6173,00
iu	Knie	6193,00
iv	Knie	6213,00
iu	Knie	6233,00
iv	Knie	6253,00
iu	Knie	6273,00
iv	Knie	6293,00
iu	Knie	6313,00
iv	Knie	6333,00
iu	Knie	6353,00
iv	Knie	6373,00
iu	Knie	6393,00
iv	Knie	6413,00
iu	Knie	6433,00
iv	Knie	6453,00
iu	Knie	6473,00
iv	Knie	6493,00
iu	Knie	6513,00
iv	Knie	6533,00
iu	Knie	6553,00
iv	Knie	6573,00
iu	Knie	6593,00
iv	Knie	6613,00
iu	Knie	6633,00
iv	Knie	6653,00
iu	Knie	6673,00
iv	Knie	6693,00
iu	Knie	6713,00
iv	Knie	6733,00
iu	Knie	6753,00
iv	Knie	6773,00
iu	Knie	6793,00
iv	Knie	6813,00
iu	Knie	6833,00
iv	Knie	6853,00
iu	Knie	6873,00
iv	Knie	6893,00
iu	Knie	6913,00
iv	Knie	6933,00
iu	Knie	6953,00
iv	Knie	6973,00
iu	Knie	6993,00
iv	Knie	7013,00
iu	Knie	7033,00
iv	Knie	7053,00
iu	Knie	7073,00
iv	Knie	7093,00
iu	Knie	7113,00
iv	Knie	7133,00
iu	Knie	7153,00
iv	Knie	7173,00
iu	Knie	7193,00
iv	Knie	7213,00
iu	Knie	7233,00
iv	Knie	7253,00
iu	Knie	7273,00
iv	Knie	7293,00
iu	Knie	7313,00
iv	Knie	7333,00
iu	Knie	7353,00
iv	Knie	7373,00
iu	Knie	7393,00
iv	Knie	7413,00
iu	Knie	7433,00
iv	Knie	7453,00
iu	Knie	7473,00
iv	Knie	7493,00
iu	Knie	7513,00
iv	Knie	7533,00
iu	Knie	7553,00
iv	Knie	7573,00
iu	Knie	7593,00
iv	Knie	7613,00
iu	Knie	7633,00
iv	Knie	7653,00
iu	Knie	7673,00
iv	Knie	7693,00
iu	Knie	7713,00
iv	Knie	7733,00
iu	Knie	7753,00
iv	Knie	7773,00
iu	Knie	7793,00
iv	Knie	7813,00
iu	Knie	7833,00
iv	Knie	7853,00
iu	Knie	7873,00
iv	Knie	7893,00
iu	Knie	7913,00
iv	Knie	

# Inhaltsverzeichnis

1	<b>Einleitung</b>	3
2	<b>Nogier/Bahr</b>	4
	2 Programmgruppe	Nogier A´-G´, Bahr 1-7
3	<b>Reininger/Bahr</b>	5
	3 Programmgruppen	Meridiane, Bahr Gefäße
4-7	<b>Bahr</b>	6
	4 Programmgruppe	Bahr Bewegungsapparat, Wirbelsäule 1-3
	5 Programmgruppe	Bahr Spezial, Frequenzen 1, 2, 3, Augen
	6 Programmgruppen	Bahr Zähne, Quadranten, Kiefergelenk
	7 Programmgruppen	Energiemeridian, OM
8-15	<b>Reininger</b>	11
	8 Programmgruppen	RI, RIII, RIII, antiker Meisterpunkt
	9 Programmgruppen	Ebenen, Diverse, Stagnation, Wandlung
	10 Programmgruppe	Erbbelastung, Lebensfrequenzen, Vervollständigung, Frequentielle Leitlinie
	11 Programmgruppe	Tiefer pathologische Punkt, Basis/Lebenslinie, Stagnation, Yin-Rhythmus, Yang-Rhythmus, Erdentönel
	12 Programmgruppe	Konfliktebenen vital/emotional/mental/kausal Regeneration, Energiefrequenzen
	13 Programmgruppe	Tonfrequenzen, Schumann-Reininger
	14 Programmgruppe	Solfeggio
	15 Programmgruppe	Anti-Frequenzen (Originalsystem)
16	<b>Scholtes</b>	21
	16 Programmgruppe	Parasiten, Viren, Bakterien, Diverse
17	<b>Ramme</b>	22
	17 Programmgruppe	TU-Hinweispunkte
18	<b>Therapieprogramme</b>	23
	Programmgruppen	Allgemein
	Programmgruppe	Orthopädie
	Programmgruppe	Derma
	Programmgruppe	Dental
	Programmgruppe	Veterinär
19	<b>Hersteller / Vertrieb</b>	25

## Biofrequenzen, die wirken

Das Lasertherapiekonzept von Reimers & Janssen beruht auf der Erfahrung von über 35 Jahren Entwicklung und Produktion medizinischer Lasertherapiegeräte. Lasertherapie heißt für uns: Umsetzung neuer komplementärer Diagnose- und Therapiemethoden mittels sanfter Laserenergie.

Unsere Produkte verbinden innovative Technologie mit einfacher Handhabung. Alle Laser neuerer Generation aus dem Hause Reimers & Janssen basieren auf dem gleichen Bedienkonzept: Eine standardisierte Software für alle Laser und Anwendungen. Einmal mit der intuitiven Bediensoftware vertraut, kann der Therapeut mit jedem Therapieprogramm sofort anfangen zu arbeiten.

Mit der Möglichkeit, die Software einfach über eine SD-Karte oder Bluetooth (LightStream) zu erweitern, können wir Ihnen immer die neuesten Therapieprogramme zur Verfügung stellen. Diese zu Therapiesets zusammengestellten Programme werden ständig mit neuen Biofrequenzen zur RAC-Diagnose und Resonanztherapie erweitert.

Die Biofrequenzen basieren auf den Forschungen von

**Dr. Paul Nogier** (1908-1996), Frankreich

**Dr. Frank Bahr**, Schüler von Dr. Paul Nogier und Gründer der Deutschen Akademie für Akupunktur und Aurikulomedizin (DAAA)

**Dr. Manfred Reininger**, Vizepräsident der Österreichischen Gesellschaft für kontrollierte Akupunktur (OGKA)

**Dr. Christoph Scholtes**, Ausbildungsleiter und Dozent für Aurikulomedizin und Akupunktur, Co-Präsident der Schweizerischen Ärztinnen- und Ärztesgesellschaft für Akupunktur - Chinesische Medizin - Aurikulomedizin, SACAM.

**Dr. Bernd Ramm**, Präsident und Dozent der Deutschen Akademie für Akupunktur und Aurikulomedizin (DAAA)

Die DAAA, OGKA und die SACAM bieten regelmäßig Fachfortbildungen zur Anwendung der Frequenzen an.

Auf den nächsten Seiten finden Sie alle aktuellen Therapieprogramme tabellarisch genau so zusammengefasst, wie Sie in der Software dargestellt werden. Informieren Sie sich über neue Frequenzen bitte bei Ihrem Vertriebspartner, damit Sie und Ihre Patienten immer vom neuesten Forschungsstand profitieren.

Nogier A'(A'')-G'/CW	
Programm	Frequenz (Hz)
A'	292,00
B'	584,00
C'	1.168,00
D'	2.336,00
E'	4.672,00
F'	9.344,00
G'	18.688,00
A''	37.376,00
CW*	0,00

Bahr I-7	
Programm	Frequenz (Hz)
B1	599,50
B2	1.199,00
B3	2.398,00
B4	4.796,00
B5	9.592,00
B6	19.184,00
B7	38.368,00

\*Die Funktion ist bei gepulsten Sonden (904 nm) nicht vorhanden, stattdessen 10000 Hz.

Nogier A-G	
Programm	Frequenz (Hz)
A	2,28
B	4,56
C	9,12
D	18,24
E	36,38
F	72,96
G	145,92

LightStream/Physiolaser

# Programmgruppe Meridiane

3

## Meridiane, Bahr Gefäße

Meridiane 1	
Programm	Frequenz (Hz)
Lunge	824,00
Dickdarm	553,00
Magen	471,00
Milz/Pankreas	702,00
Herz	497,00
Dünndarm	791,00
Blase	667,00

Meridiane 2	
Programm	Frequenz (Hz)
Niere	611,00
Kreislauf-Sexus	530,00
3 Erwärmer	732,00
Gallenblase	583,00
Leber	442,00
Du Mai	637,00
Ren Mai	1102,00

Bahr Gefäße	
Programm	Frequenz (Hz)
LG (K-Dü 3)	637,00
KG (K-Lu 7)	1.102,00
Gürtelgefäß (K-Gb 41)	1.152,00
Breite Bahn (K-MP 4)	699,00
Yang-Haltegefäß (K-3E 5)	7700,00
Yin-Haltegefäß (K-KS 6)	1.090,00
Aufsteig. Yang (K-BI 62)	532,00
Aufsteig. Yin (K-Ni 6)	544,40

# Programmgruppe Bahr Bewegung

4

Bewegungsapparat, Wirbelsäule 1, 2, 3

Bahr Gelenke	
Programm	Frequenz (Hz)
Hüfte	873,00
Knie	893,00
Fußgelenk	913,00
Schulter	931,00
Ellbogen	952,00
Handgelenk	955,00
Atlas	1.039,00
Achilles Sehne	1.111,00
Fersensporn	1.110,00

Bahr Wirbelsäule 1	
Programm	Frequenz (Hz)
1. Halswirbel	1.039,00
2. Halswirbel	1.040,00
3. Halswirbel	1.042,00
4. Halswirbel	1.044,00
5. Halswirbel	1.046,00
6. Halswirbel	1.048,00
7. Halswirbel	1.050,00
1. Brustwirbel	1.052,00
2. Brustwirbel	1.053,00
3. Brustwirbel	1.054,00
4. Brustwirbel	1.055,00

Bahr Wirbelsäule 2	
Programm	Frequenz (Hz)
5. Brustwirbel	1.056,00
6. Brustwirbel	1.059,00
7. Brustwirbel	1.061,00
8. Brustwirbel	1.063,00
9. Brustwirbel	1.065,00
10. Brustwirbel	1.067,00
11. Brustwirbel	1.069,00
12. Brustwirbel	1.071,00
1. Lumbalwirbel	1.073,00
2. Lumbalwirbel	1.078,00
3. Lumbalwirbel	1.083,00

Bahr Wirbelsäule 3	
Programm	Frequenz (Hz)
4. Lumbalwirbel	1.088,00
5. Lumbalwirbel	1.093,00
Kreuzbein	1.095,00
Steißbein	1.096,00
Tor des Lebens	4.112,00

# Programmgruppe Bahr Spezial

5

Frequenzen 1, 2, 3, Augen

Bahr Spezial 1	
Programm	Frequenz (Hz)
Allergie	1.927,00
Appetithemmer	4.070,00
Anti-Aging	4.141,00
Entgiftung	969,00
Hysterie	1.131,00
Insulin (Dr. Wirz)	3.323,00
OM	136,10
Parkinson	9.617,00
Qi-Bewegung	7.695,00
Schmerz Thalamus	963,50
Schmerz Prostaglandin EI	1.152,00

Bahr Spezial 3	
Programm	Frequenz (Hz)
Multiple Sklerose	7.706,00
Hämorrhoiden	1.122,00
Prostata	669,00
ADHS	547,00
Nikotin	539,00
ZNS-Gedächtnispunkte	7.712,00
Master Tung 88.13	8.710,40
Bourdiol	563,00
Autoaggression	4.605,00
Stammzellen (Dr. Greiner)	2442,00

Bahr Spezial 2	
Programm	Frequenz (Hz)
Selbsteilung	4.625,00
Serotonin	9.637,00
Simillimum	7.708,00
Entgiftung	969,00
Sucht	1.719,00
Tinnitus	641,00
Ordnung	9.592,00
Unordnung/Störherd	292,00
Verdeckte Störherde	299,75
Cortison 3E 3	5.743,00

Bahr Spezial Augen	
Programm	Frequenz (Hz)
BI I	239,00
EX-HN4	240,00
3E 23	241,00
Gb I	242,00
Ma 2	243,00

# Programmgruppe Bahr Zähne

6

Quadrant 1, 2, 3, 4, Kiefergelenk

Bahr Zähne Quadrant 1	
Programm	Frequenz (Hz)
1.1	803,00
1.2	813,00
1.3	823,00
1.4	833,00
1.5	843,00
1.6	853,00
1.7	863,00
1.8	873,00

Bahr Zähne Quadrant 3	
Programm	Frequenz (Hz)
3.1	643,00
3.2	653,00
3.3	663,00
3.4	673,00
3.5	683,00
3.6	693,00
3.7	703,00
3.8	713,00

Bahr Zähne Quadrant 2	
Programm	Frequenz (Hz)
2.1	793,00
2.2	783,00
2.3	773,00
2.4	763,00
2.5	753,00
2.6	743,00
2.7	733,00
2.8	723,00

Bahr Zähne Quadrant 4	
Programm	Frequenz (Hz)
4.1	953,00
4.2	943,00
4.3	933,00
4.4	923,00
4.5	913,00
4.6	903,00
4.7	893,00
4.8	883,00

Bahr Kiefergelenk	
Programm	Frequenz (Hz)
Kiefergelenk links	718,00
Kiefergelenk rechts	875,00

# Programmgruppe Bahr

7

Energiemeridian, Traumen, OM

EN-Meridian 4 bis 6	
Programm	Frequenz (Hz)
-4 EN	363,00
-3 EN	3.858,00
-2 EN	3.854,00
-1 EN	3.850,00
0 EN Wende	3.790,00
1 EN Basis	4.023,00
2 EN Sexual	3.123,00
3 EN Nabel	2.398,00
4 EN Herz	1.589,00
5 EN Hals	990,00
6 EN Stirn	573,00

EN-Meridian 18 bis 24	
Programm	Frequenz (Hz)
18 EN Innere Stabilität	7.715,00
19 EN Selbstheilung	4.625,00
20 a EN Energie 1-2	8.713,00
20 b EN Energie 1-3	9.614,00
20 c EN Energie 1-4	9.904,00
20 d EN Energie 1-5	9.983,00
21 EN Selbstentfaltung	2.666,00
22 EN Seelenwärme	3.751,00
23 EN Wohlfühlen	9.637,00
24 a EN Reinheit 1	8.713,00
24 b EN Reinheit 2	9.641,00

EN-Meridian 7 bis 17	
Programm	Frequenz (Hz)
7 EN Kronen	232,00
8 EN Schamanen 8	7.696,00
9 EN Schamanen 9	7.696,50
10 EN Schutz	7.697,00
11 EN Pocken	7.698,00
12 EN Pest	7.699,00
13 EN Störherd	7.700,00
14 EN Über-Omega	7.707,00
15 EN Meister Konstitution	7.708,00
16 EN Geistiger Kern	7.710,00
17 EN Lösen von Belastung	7.713,00

EN-Meridian Meister	
Programm	Frequenz (Hz)
25 EN geistiger Horizont	9.909,00
26 EN tiefer innerer Frieden	9.990,00
27 EN Yin/Yang	9.996,00
Meister Qi	7.695,00
Meister neg. Qi	363,00
EN MAX-OM	136,10

Mentale Traumen	
Programm	Frequenz (Hz)
Oregon Grape	363,00
Sturt Desert Pea	795,00
Bleeding Heart	997,00
Isopogon	4.354,00
Yellow Star Tulip	3.751,00

Bahr OM	
Programm	Frequenz (Hz)
OM-1	136,10
OM-2 Lateralität	272,20
OM-3 Valium	544,40
OM-4 Omega 2	1.088,80
OM-5 Omega I Amalgam	2.177,60
OM-6 Omega Hauptpunkt	4.355,20
OM-7 Über-Omega	8.710,40
Master Tung 88.13	
OM-8 hoch	17.420,8

# Programmgruppe Reininger

8

RI, RIII, RIII, antiker Meisterpunkt

Reininger I	
Programm	Frequenz (Hz)
RI 1 Basis-T	132,00
RI 2 Corticotroper P.	264,00
RI 3 Basis-Schwäche	528,00
RI 4 Lateralitäts- steuerp.	1.056,00
RI 5 Omega I	2.112,00
RI 6 Basis Vitamin	4.224,00
RI 7 Erbnosode	8.448,00

Reininger III	
Programm	Frequenz (Hz)
RIII 1 Vitalebene	112,50
RIII 2 Emotionalebene	225,00
RIII 3 Mentalebene	450,00
RIII 4 Kausalebene	900,00
RIII 5 Konstitution Yang	1.800,00
RIII 6 Konst. Organkoppl.	3.600,00
RIII 7 Konstitution Yin	7.200,00

Reininger II	
Programm	Frequenz (Hz)
RII 1 Reunionsz. links G.	113,00
RII 2 Reunionsz. rechts G.	226,00
RII 3 Reunionsz. links S.	452,00
RII 4 Reunionsz. rechts S.	904,00
RII 5 VIP 1	1.808,00
RII 6 VIP 2	3.616,00
RII 7 TUP (2x)	7.232,00

Antiker Meisterpunkt	
Programm	Frequenz (Hz)
Le 13	3665,00
KG 12	3.351,00
KG 17	3.305,00
Lu 9	4.421,00
BI 17	4.189,00
Gb 39	4.090,00
BI 11	3.894,00
Gb 34	3.416,00
MP 9	3.534,00

# Programmgruppe Reiningen

9

Ebenen, Diverse, Stagnation, Wandlung

Ebenen 1	
Programm	Frequenz (Hz)
M-HWF	1.025,00
VIPI/2	1.808,00
TUP	7.232,00
LG/KG	456,00
MdO	7.296,00
M-HWPI	4.353,00
M-HWP2	3.200,00
V-HWF	1.153,00
Psyche	228,00
Basis-S	528,00
Basis-T	132,00

Ebenen 2	
Programm	Frequenz (Hz)
V-HWP	2.817,00
K-HWF	3.968,00
K-HWPI	4.864,00
K-HWP2	2.432,00
Hinweis Melatonin	1.025,00
Hinweis Valium	1.153,00
Hinweis Vitamin K	3.986,00

Diverse Frequenzen	
Programm	Frequenz (Hz)
Regeneration	640,00
Regeneration-Störfeld	2.505,00
Geopathogen	182,00
Toxisch	7.680,00
Stabilisierung	616,00
Destabilisierung	2.409,00

Stagnation	
Programm	Frequenz (Hz)
Lokal Go/Si	2.273,00
Mangelstagnation	168,00
Energieverlust	2.004,0
Energetischer Aufbau	512,00
Mittag/Mitternacht	1.004,00
Zirkulatorische Enge	1.730,00

Frequenzen der sieben Wandlungsphasen	
Programm	Frequenz (Hz)
Holz	317,00
Feuer	484,00
Erde	478,00
Metall	561,00
Luft	4.239,00
Wasser	130,00

# Programmgruppe Reiningen

10

Erbbelastung, Lebensfrequenzen, Vervollständigung  
Frequentielle Leitlinie

Erbbelastung	
Programm	Frequenz (Hz)
Yang im Yang 1	1.478,25
Yang im Yang 2	2.217,40
Yin im Yang	2.159,00
Yang im Yin	8.448,00
Yin im Yin	258,00

Lebensfrequenzen	
Programm	Frequenz (Hz)
LFR1	128,00
LFR2	256,00
LFR3	512,00
LFR4	1.024,00
LFR5	2.048,00
LFR6	4.096,00
LFR7	8.192,00

Sieben möglichen Punkte der Vervollständigung	
Programm	Frequenz (Hz)
Amethystpunkt	1.824,00
Eintritt in das Soma	7.296,00
Zirkulatorische Enge	1.729,00
Regenerationsbehinderung	2.503,00
Räumliche und zeitliche Mitte	6.238,00
Übergeordneter Neupunkt	4.239,00
Yin-Organ-Zirkulationsstörung	3.648,00

Frequentielle Leitlinie		Psychogene Belastung kausal	900,00
Programm	Frequenz (Hz)	Tritonus	1250,00
Störfeld Nogier A	292,00	Geopathogene Belastung	182,00
Tritonus	405,50	Tritonus	252,80
Störfeld Bahr 7	299,75		
Tritonus	416,30		
Unverträglichkeiten	3.600,00		
Tritonus	5.000,00		
Virale Belastung	1.408,00		
Tritonus	1.955,50		
Bakterielle Belastung	1.664,00		
Tritonus	2.311,10		
Yang im Yin-Erbbelastung	8.448,00		
Tritonus	11.733,3		
Yin im Yang-Erbbelastung	2.159,00		
Tritonus	2.998,60		
Yin im Yin-Erbbelastung	258,00		
Tritonus	358,30		
Yang im Yang-Erbbelastung 1	1.478,20		
Tritonus	1.064,30		
Yang im Yang-Erbbelastung 2	2.217,40		
Tritonus	1.596,50		
Toxische Belastung	7.680,00		
Tritonus	10.666,60		
Psychogene Belastung emotional	225,00		
Tritonus	312,50		
Psychogene Belastung mental	450,00		
Tritonus	625,00		

# Programmgruppe Reiningger 2018



Tiefer pathologische Punkt, Basis/Lebenslinie,  
Stagnation, Yin-Rhythmus, Yang-Rhythmus  
Erdentöne

Tiefer pathologische Punkt	
Programm	Frequenz (Hz)
TPP Typ 1	512,00
TPP Typ 2	576,00
TPP Typ 3	638,00
TPP Typ 4	653,00
TPP Typ 5	676,00
TPP Typ 6	684,00

Basis/Lebenslinie	
Programm	Frequenz (Hz)
Lebenslinie	1.315,00
Basis-Schwäche	2.359,00
Terrain-Schwäche	528,00
Linie der Regeneration	640,00
Yin-Malnutrition	264,00
Basis-T	132,00

Stagnation LG/KG	
Programm	Frequenz (Hz)
Gestörte Aufwärtsbewegung	763,00
Gestörte Abwärtsbewegung	98,00

Yin-Rhythmus, Yang-Rhythmus	
Programm	Frequenz (Hz)
Yin-Rhythmus	3.223,00
Yang-Rhythmus	1.944,00

Erdentöne	
Programm	Frequenz (Hz)
G 1	97,35
G 2	1.94,70
G 3	389,4
G 4	778,80
G 5	1.557,60
G 6	3.115,20
G 7	6.230,40
Cis 1	68,05
Cis 2	136,10
Cis 3	272,20
Cis 4	544,40
Cis 5	1.088,80
Cis 6	2.177,60
Cis 7	4.355,20
F 1	86,03
F 2	172,06
F 3	344,12
F 4	688,24
F 5	1.376,48
F 6	2.752,96
F 7	5.505,92

# Programmgruppe Reinger 2018

12

Konfliktebene vital/emotional/mental/kausal  
Regeneration, Energiefrequenzen

Konflikt Vitalebene	
Programm	Frequenz (Hz)
Quintfall 1.A	438,00
Tritonus 1.A	315,40
Quintfall 2.A	657,00
Tritonus 2.A	473,00
Quintfall 3.A	985,50
Tritonus 3.A	709,50

Konflikt Emotionalebene	
Programm	Frequenz (Hz)
Quintfall 6.A	3.326,00
Tritonus 6.A	2.394,70
Quintfall 7.A	4.989,10
Tritonus 7.A	3.592,10
Quintfall 8.A	7.484,00
Tritonus 8.A	5.388,50
Quintfall 9.A	11.226,10
Tritonus 9.A	8.082,70
Quintfall 10.A	16.839,00
Tritonus 10.A	12.124,00
Quintfall 11.A	194,60
Tritonus 11.A	140,20

Konflikt Mentalebene	
Programm	Frequenz (Hz)
Quintfall 1.7	449,60
Tritonus 1.7	323,70
Quintfall 2.7	674,40
Tritonus 2.7	485,50
Quintfall 3.7	1.011,60
Tritonus 3.7	728,30
Quintfall 4.7	1.517,40
Tritonus 4.7	1.092,50
Quintfall 5.7	2.276,20
Tritonus 5.7	1.638,90
Quintfall 6.7	3.414,30
Tritonus 6.7	2.458,30
Quintfall 7.7	5.121,50
Tritonus 7.7	3.687,50
Quintfall 8.7	7.682,20
Tritonus 8.7	5.531,20
Quintfall 9.7	11.523,40
Tritonus 9.7	8.2972,00
Quintfall 10.7	17.285,10
Tritonus 10.7	12.445,30

Konflikt Kausalebene	
Programm	Frequenz (Hz)
Quintfall 1.6	224,80
Tritonus 1.6	161,80
Quintfall 2.6	337,21
Tritonus 2.6	242,80
Quintfall 3.6	505,80
Tritonus 3.6	364,20
Quintfall 4.6	758,70
Tritonus 4.6	546,20
Quintfall 5.6	1.138,10
Tritonus 5.6	819,40
Quintfall 6.6	1707,10
Tritonus 6.6	1.239,10
Quintfall 7.6	2.560,70
Tritonus 7.6	1.843,70
Quintfall 8.6	3.841,10
Tritonus 8.6	2.765,60
Quintfall 9.6	5.761,70
Tritonus 9.6	4.148,40

Energiefrequenzen	
Programm	Frequenz (Hz)
Kosmische Energie	670,20
Atemenergie Yin	2.296,50
Nahrungsenergie Yang	877,20
Nahrungsenergie Yin	1.419,40
Erbenergie Yang	1.084,40
Erbenergie Yin	542,20
Essenz	335,10

Regeneration	
Programm	Frequenz (Hz)
Sealf heal (Bahr)	4.625,00
Aloe Vera	2.858,20
Schüsslersalz Nr. 21	1.766,40

## Tonfrequenzen, Schumann-Reiningger

Tonfrequenzen	
Programm	Frequenz (Hz)
a	216,00
b	225,00
h	243,00
c`	249,20
c#	270,00
d	288,00
d#	300,00
e`	324,00
f	345,60
f#	360,00
g	388,80
g#	405,00

Schumann-Reiningger	
Programm	Frequenz (Hz)
Sm 1 (oktaviert)	1.002,24
Sm 2 (oktaviert)	1.049,60
Sm 3 (oktaviert)	1.223,68
Sm 4 (oktaviert)	1.280,00
Sm 5 (oktaviert)	1.600,00
Sm 6 (oktaviert)	1.830,40
SmR 7 (oktaviert)	2.112,00
SmR 8 (oktaviert)	2.457,40

## Solfeggio

Solfeggiofrequenzen	
Programm	Frequenz (Hz)
Sol 1	174,00
Sol 1 Quinte	261,00
Sol 2	285,00
Sol 2 Quinte	427,50
Sol 3	396,00
Sol 3 Quinte	594,00
Sol 4	417,00
Sol 4 Quinte	625,50
Sol 5`	528,00
Sol 5 Quinte	792,00
Sol 6	639,80
Sol 6 Quinte	958,50
Sol 7	741,00
Sol 7 Quinte	111,50
Sol 8	852,00
Sol 8 Quinte	1276,00
Sol 9	963,00
Sol 9 Quinte	1444,50
Sol 10	993,00
Sol 10 Quinte	1489,00
Sol 11	1023,00
Sol 11 Quinte	1534,50
Sol 12	1041,00
Sol 12 Quinte	1561,50

# Programmgroup Reinerger

15

## Anti-Frequenzen (Originalsystem)

Anti-Frequenzen	
Programm	Frequenz (Hz)
Psyche	129,00
Anti-Psyche	4.221,00
Vegtativum	112,00
Anti-Vegtativum	3.665,00
Sucht	101,00
Anti-Sucht	3.305,00
Carcinom	108,00
Anti-Carcinom	3.534,00
Schmerz	119,00
Anti-Schmerz	3.894,00
Entzündung	128,00
Anti-Entzündung	4.189,00
Allergie	104,00
Anti-Allergie	3.416,00
Tinnitus	125,00
Anti-Tinnitus	4.090,00
Immun	102,00
Anti-Immun	3.351,00
Allgemein	384,00
Viral	1.408,00
Anti-Viral	360,00
Bakteriell	1.664,00
Anti-Bakteriell	425,00

# Programmgruppe Scholtes

16

Parasiten, Viren, Bakterien, Diverse

Parasiten	
Programm	Frequenz (Hz)
Ascaris	4.553,60
Babesia	4.862,30
Lamblien	5.481,60
Toxoplasmen	4.826,00
Parasiten	3.774,00

Viren	
Programm	Frequenz (Hz)
Cytomegalo	3.484,10
Epstein Barr	6.461,80
Herpes Simplex	2.735,20
Herpes Zoster	3.847,30
Influenza	4.770,60
HPV	7.126,20
Corona	6.282,60

Bakterien	
Programm	Frequenz (Hz)
Anaplasma	6.747,10
Bartonella	3.731,70
Borrelien	3.734,20
Chlamydien	7.832,40
Heliobacter	1.287,80
Coxiella	3.947,80
Mycoplasma	5.862,00
Yersinia entero	8.571,80

Diverse	
Programm	Frequenz (Hz)
Basiskonstitution	1.267,00
Tumorlinie	2.574,80
VD Rezeptor	6.278,00
Impfbelastung	7.928,20

# Programmgruppe Ramme

17

## TU-Hinweispunkte

TU-Hinweispunkte	
Programm	Frequenz (Hz)
Pkt. des Ausgleichs	996,00
Pkt. des Scheidewegs	977,00
Pkt. der Hinwendung	938,00
Pkt. der Ruhe	923,00
Pkt. des Zentrums	845,00
Pkt. der Hybris	824,00
Pkt. der Heilungsverweigerung	645,00

Programmgruppe Allgemein I
Programm
Dauerstrahl*
Universal
Skelett/Muskulatur
Wirbelsäule
Innere Organe
Gefäße/Lymphhe
Haut
Körperöffnungen
Nerven
Psyche/Emotionen

\*Funktion bei Impulssonden nicht vorhanden

Programmgruppe Orthopädie
Programm
Arthritis
Arthrose
Fraktur
Muskulatur
Sehnen/Bänder
Wirbelsäule
Distorsion
Trauma
Ödem/Hämatom
Lumbago
Schmerz

Programmgruppe Allgemein 2
Programm
Relaxierung
Regeneration
Entzündung
Metabolismus
Schmerz
Psychosomatisch
Blockade
Fokus
Allergie
Wunden

Programmgruppe Derma
Programm
Akne
Herpes
Alopecia areata
Alopecia diffusa
Juckreiz
Ulcus
Wunden entzündlich
Narben
Neurodermitis
Ödem
Gesichtshaut

Programmgruppe Dental	Programmgruppe Veterinär
Programm	Programm
Post extractum	Dauerstrahl*
Parodontitis	Wunden
Mucosa	Gelenke
Herpes/Aphthen	Sehnen
Knochen	Innere Organe
Hypersensibilität	Allergie
Ödem	Lahmheit
Blockade	Narben
Fokus	Schmerz
Psyche/Angst	Gefäße/Lymphe
Schmerz	Relaxierung

\* Die Funktion ist bei gepulsten Sonden (904 nm) nicht vorhanden.

### Weitere Therapieprogramme stehen auf Anfrage zur Verfügung:

- Chiropractor (für gepulste Laserdioden 904 nm)
- Wellness
- Kosmische Frequenzen (u.a. Planeten)
- Veterinär (für gepulste Laserdioden 904 nm)



Reimers & Jansen GmbH  
Fabrikstrasse 22  
79183 Waldkirch  
Deutschland  
Tel. +49 7681 493 4149



Qualitätsmanagement  
EN ISO 13485

Version 3.2  
02.09.2025



[www.rj-laser.com](http://www.rj-laser.com)

## Vertriebspartner

