


## Gebrauchsanweisung

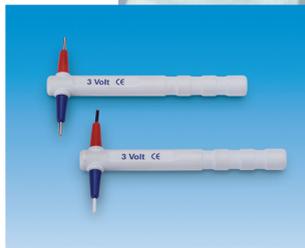

**3 V-Hämmerchen**

**3 V-schwarz-weiß Hämmerchen**

**3 V-Hämmerchen.....REF 303700**

**3 V-schwarz-weiß Hämmerchen.....REF 303690**

## Inhalt

---

Zweckbestimmung	3
Zum sicheren Gebrauch des Produktes	3
Beschreibung des Produktes	4
Beschreibung der Bildzeichen	4
Technische Daten	5
Inbetriebnahme	5
Klassifizierung	5
Vorsichtsmaßnahmen	5
Messen der Batteriespannung	5
Auswechseln der Lithium-Batterie	6
Kombination	6
Pflege und Reinigung	6
Garantie	6
Neueinstellungen, Änderungen und Reparaturen	7
Schaltpläne, Ersatzteillisten und Einstellanweisungen	7
Entsorgung	7
Lieferumfang	7

# Gebrauchsanweisung

## 3 V-Hämmerchen / 3 V-schwarz-weiß Hämmerchen

3

D

### Zweckbestimmung

Das 3 V-Hämmerchen wurde zum Erzeugen von elektrostatischen Feldern konzipiert. Verwenden Sie das Produkt für keine anderen Zwecke.

### Zum sicheren Gebrauch des Produktes

**Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Produktes die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch!**

- Wasser oder andere Flüssigkeiten von dem 3 V-Hämmerchen fernhalten. Nie ins Wasser tauchen.
- Nie beide Pole kurzschließen.
- Das 3 V-Hämmerchen nicht fallen lassen, unsachgemäß behandeln, Extremtemperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aussetzen (nur anwenden bei einer Temperatur zwischen 10 °C und 40 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 90 %).
- Benutzen Sie das 3 V-Hämmerchen nie, wenn es beschädigt worden ist.
- Sorgfältige Aufsicht ist geboten, wenn das 3 V-Hämmerchen an oder in der Nähe von Kindern angewendet wird.

# Gebrauchsanweisung

## 3 V-Hämmerchen / 3 V-schwarz-weiß Hämmerchen

4

D

### Beschreibung des Produktes

Das 3 V-Hämmerchen dient der Erzeugung von elektrostatischen Feldern. Das Produkt ist mit einer langlebigen 3 V-Lithium-Batterie ausgestattet. Der jeweilige Pol wird dicht über die Hautstelle gehalten, ohne die Haut zu berühren.

### Beschreibung der Bildzeichen



Achtung, Begleitdokumente beachten!

**REF**

Diesem Symbol folgt die Artikel- bzw. Bestellnummer des Produktes.



Diesem Symbol folgt die Chargenbezeichnung des Produktes.



Dieses Symbol, gemäß der Verordnung über die Rücknahme und Entsorgung gebrauchter Batterien und Akkumulatoren (BattV), auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Das bedeutet, dass das Produkt am Ende der Nutzungszeit unentgeltlich bei einer kommunalen Sammelstelle oder beim Hersteller zur Wiederverwertung abgegeben werden muss. Dies ist ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz.



**Li**

Dieses Produkt enthält eine Lithium-Batterie, die wiederverwert werden kann. Bitte beachten Sie stets die jeweils gültigen Gesetze und Verordnungen zur Entsorgung von Batterien.



Konformitätsnachweis in Bezug auf die Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte.

# Gebrauchsanweisung

## 3 V-Hämmerchen / 3 V-schwarz-weiß Hämmerchen

5

D

### Technische Daten

---

Spannungsversorgung	3 V-Lithium-Batterie (Typ 435), konfektioniert
Gewicht	ca. 20 g (inkl. Lithium-Batterie)

### Inbetriebnahme

---

Das 3 V-Hämmerchen besitzt keine Bedienelemente, es ist jederzeit betriebsbereit.

### Klassifizierung

---

Das 3 V-Hämmerchen wird nach Anhang IX der EG-Richtlinie über Medizinprodukte in die Klasse I eingestuft.

### Vorsichtsmaßnahmen

---

Achten Sie darauf, dass die beiden Pole nicht leitend miteinander verbunden werden, da sonst die Lithium-Batterie entladen wird.

### Messen der Batteriespannung

---

Die Pole des 3 V-Hämmerchens ermöglichen das Messen der Batteriespannung mit jedem beliebigen Voltmeter. Wenn die Batteriespannung unter 3 V gesunken ist, sollte die Lithium-Batterie erneuert werden.

## Gebrauchsanweisung

### 3 V-Hämmerchen / 3 V-schwarz-weiß Hämmerchen

D

#### Auswechseln der Lithium-Batterie

---

Zum Auswechseln der Lithium-Batterie schrauben Sie die rote Kunststoffkappe ab. Nun können Sie die Lithium-Batterie auswechseln. Gegebenenfalls drücken Sie hierzu den Pol der blauen Kappe auf eine harte Unterlage.

Ersatzbatterien sind unter der Artikelnummer 451010-0009 erhältlich.

#### Kombination

---

Mit dem 3 V-Hämmerchen wird bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kein anderes Produkt kombiniert.

#### Pflege und Reinigung

---

Für das 3 V-Hämmerchen sind keine besonderen Pflege- und Reinigungsmittel notwendig, es ist lediglich mit einem weichen, fusselfreien Tuch zu reinigen. Zur Reinigung kann etwas Alkohol (70 %ig) verwendet werden. Es ist darauf zu achten, dass keine Flüssigkeit in das Innere des Produktes gelangt.

#### Garantie

---

Bei sachgerechter Handhabung des 3 V-Hämmerchens (keine leitfähige Verbindung der Pole) garantieren wir den Spannungserhalt der Lithium-Batterie von 3 Volt für mindestens zwei Jahre.

### Neueinstellungen, Änderungen und Reparaturen

Verantwortlich für die Sicherheit und Leistung des Produktes betrachtet sich der Hersteller nur, wenn Neueinstellungen, Änderungen und Reparaturen durch ihn selbst oder durch von ihm ermächtigte Personen durchgeführt werden und das Produkt in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung betrieben wird.

### Schaltpläne, Ersatzteillisten und Einstellanweisungen

Auf Wunsch stellen wir entsprechend qualifiziertem und in die technische Bauweise des Produktes eingewiesenem Personal des Anwenders Schaltpläne, Ersatzteillisten und Einstellanweisungen zur Verfügung.

### Entsorgung

Der Hersteller verpflichtet sich zur Rücknahme des Produktes und zu dessen ordnungsgemäßer Entsorgung.

### Lieferumfang

3 V-Hämmerchen (Art.-Nr. 303700)  
Gebrauchsanweisung (Art.-Nr. 451600-0267)

bzw.

3 V-schwarz-weiß-Hämmerchen  
(Art.-Nr. 303690)  
Gebrauchsanweisung (Art.-Nr. 451600-0267)



Akupunkturbedarf Karl Blum GmbH  
Breslauer Straße 42 · D-82194 Gröbenzell  
Tel.: +49 (0) 8142 448 480 · Fax: +49 (0) 8142 448 4820  
info@blum-akupunktur.de · www.blum-akupunktur.de

Hersteller:  
Pierenkemper GmbH  
✉ Hörnsheimer Eck 19 · 35578 Wetzlar · Germany  
☎ +49 6441 67923-0  
📠 +49 6441 67923-33  
✉ info@pieren-tech.de  
💻 www.pieren-tech.de

451600-0267  
Version 1

