

D-WIPES

Wischtücher im
wiederbefüllbaren Spendersystem



DESOTEX - Premium Vlies



Über 30 Jahre Kompetenz in Desinfektion und Hygiene

Die Unternehmensgruppe Dr. Schumacher ist seit über 30 Jahren als Spezialist in der Herstellung von Desinfektions- und Reinigungsmitteln bekannt und gehört darüber hinaus zu den europaweit führenden Unternehmen mit eigener Produktion von trockenen und getränkten Tüchern für jegliche Anwendungsbereiche. Dies erreicht eine einzigartige Synergie aus Kompetenz in der Herstellung von Desinfektionsmitteln und ausgefeilter Tuchherstellung auf höchstem technologischem Niveau. Wir setzen als einziger Desinfektionsmittelhersteller mit eigener Tuchproduktion Maßstäbe im Hygienemarkt und bieten für alle Anwendungsbereiche passende Applikationen vom Reinigungstuch über kosmetische Produkte bis zum Desinfektionstuch.



Hochmodernes Produktionszentrum für herausragende Qualitätsprodukte



In unserem hochmodernem Produktionszentrum auf über 30.000 qm mit weit über 40 Produktionslinien im Trocken- und Feuchttuchbereich werden tagtäglich bis zu 800.000 qm Vlies und zahlreiche Qualitätsprodukte in unterschiedlichsten Faltechniken gefertigt. Hier werden unsere DESOTEX Premium Vliestoffe unter strengsten Prüfbedingungen verarbeitet und bilden somit einen Garant für zahlreiche Qualitätsprodukte wie z.B. D-Wipes, Deso-Wipes oder Desocare.

Unsere speziell entwickelten Entnahmesysteme lassen Desinfektionswirkstoffe nicht entweichen und können im chemothermischen Verfahren praktisch aufbereitet und anschließend wieder verwendet werden.



DESOTEX Forschung & Entwicklung

Mit unserer eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung, angeschlossener Abteilung für Mikrobiologie und eigenem Maschinenbau, garantieren wir Flexibilität mit hoher Produktsicherheit durch lückenlose Qualitätssicherung. Das gesamte Sortiment entspricht höchsten Qualitätsstandards; das garantiert ein Top-Qualitätsmanagement, mehrfach auditiert nach ISO 9001, GMP und EMAS sowie eine Ökozertifizierung nach ISO 14001 und QAKE.

✓ ISO 9001

✓ ISO 14001




Hohe Anwendungssicherheit in der Hygiene

Für die Anwendung im medizinischen und pflegerischen Bereich verwenden wir ausschließlich hochwertige, in zahlreichen Labortests bewährte DESOTEX Premium Vliesstoffe. Hierdurch können wir zu jeder Zeit eine optimale Wirkstoffabgabe unserer Produkte garantieren. DESOTEX Produkte stehen somit für ein hohes Maß an Anwendungssicherheit und schützen Personal, Patienten und Bewohner.

Einweg-Desinfektionstücher-Rollen aus Desotex-Material werden regelmäßig auf Ihre technische Anwendung geprüft und stellen in der professionellen Anwendung eine hygienische, sichere und wirtschaftliche Alternative zu Mehrwegsystemen dar. Der Einsatz unserer Desinfektionstücher-Rollen entspricht den Hygiene-Anforderungen und verhindert im praktischen Einsatz der Flächendesinfektion eine Verschleppung von Krankheitserregern. Einer Kreuzkontamination wird durch das geschlossene Einwegsystem in unseren geprüften Feuchttuchspendern vorgebeugt.

Bestätigte Desinfektionswirkung und Stabilität

Als einziger Hersteller von Desinfektionsmitteln mit eigener Tuchproduktion haben wir uns mit der Fragestellung beschäftigt, wie Desinfektionslösungen in Verbindung mit Fasermischungen interagieren. Bei der Auswahl der richtigen Vliese stehen neben der Anforderung an die Wirkstoffabgabe u.a. auch die der geeigneten Applikationsform im Vordergrund. In unserer eigenen Desotex-Forschungs- und Entwicklungsabteilung haben wir verschiedenste Kombinationen von Tüchern und Desinfektionsmitteln erforscht. Die desinfizierende Wirkung unserer Desinfektionstücher aus DESOTEX Premium Vliesstoffen wurde nach den Standardmethoden der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie mit einer Vielzahl von Desinfektionsmitteln von unabhängigen, akkreditierten Prüflaboratorien begutachtet. Desinfektionstücher aus DESOTEX Premium Vliesstoffen erreichen eine praktisch 100%ige Abgabe von Desinfektionsmittel-Wirkstoffen. Unsere Desinfektionstücher-Rollen verfügen über eine gutachterlich bestätigte, mikrobiologische Stabilität im geschlossenen System von 28 Tagen.

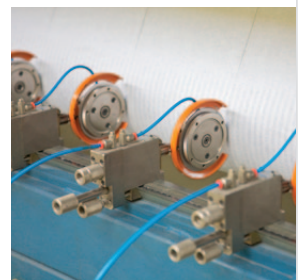



D-WIPES

Wischtücher im wiederbefüllbaren Spendersystem



Wirkstoffabgabe und Desinfektionswirkung umfangreich getestet



- trockene Wischtücher zur Tränkung mit Desinfektionsmitteln
- einfache und sichere Entnahme durch wiederverschließbares Spendersystem
- universell einsetzbar

D-WIPES können zur desinfizierenden Reinigung in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden. Die Wischtücher werden mit gebrauchsfertiger Desinfektionsmittellösung getränkt: 2,5 - 3 Liter bei Verwendung der 100-Blatt-Rolle oder 1 - 1,5 Liter bei der 50-Blatt-Rolle.

Die Entnahme erfolgt aus dem speziell konzipierten Feuchttuchspender, der absolut dicht ist. Durch die Wiederverschließbarkeit wird das nachfolgende Tuch vor Austrocknung geschützt.

Die mit Desinfektionsmittel getränkten Tücher sind über einen Zeitraum von 28 Tagen verwendbar.

Der Feuchttuchspender ist beständig gegenüber Desinfektionsmitteln sowie spülmaschinenfest bis 60 °C.

Für die Feuchttuchspender sind praktische, abschließbare Wandhalterungen erhältlich, die leicht an Wänden oder Schränken zu montieren sind.



Anwendungsbereiche

- schnelle und unkomplizierte desinfizierende Reinigung von Flächen und Medizinprodukten

Feuchttuchspender VE

1	D-WIPES Feuchttuchspender rund (weiß mit blauer Entnahme)	1
1	D-WIPES Feuchttuchspender rund (weiß mit blauer Entnahme)	6
1	D-WIPES Feuchttuchspender eckig (weiß mit blauer Entnahme)	1

NEU

Tücher VE

D-WIPES			
1	Rolle	50 Tücher (32 x 30 cm)	3
1	Rolle	100 Tücher (32 x 30 cm)	6

Zubehör VE

WANDHALTER FT für Feuchttuchspender	1
-------------------------------------	---

Verschiedene Produkte - verschiedene Farbvarianten

Für den Einsatz verschiedener Produkte haben wir unser Spendersystem durch 4 zusätzliche Deckelvarianten erweitert. Hierdurch kann anhand der Farbe auf den ersten Blick eine Unterscheidung von verschiedenen Produkten und deren Einsatzbereich getroffen werden.

Alle Deckel unserer Feuchttuchspender (rund/eckig) sind mit Entnahmeöffnungen in den Farben ROT, GELB, GRÜN, BLAU und WEISS erhältlich.





Das Produktsystem – die Vorteile

✓ Außerordentlich wirtschaftlich

Im Feuchttuchspender stehen mit einem Ansatz 100 (bzw. 50) getränkte Tücher zur Nutzung zur Verfügung. Durch die Nutzungsdauer von 28 Tagen ist das System auch für Bereiche geeignet, in denen eine desinfizierende Reinigung lediglich bei Bedarf erforderlich ist, z. B. im Bewohnerzimmer. Im Gegensatz zu offen bereit gestellten Desinfektionsmittellösungen, muss bei diesem System die Anwendungslösung nicht täglich verworfen werden.

✓ Hygienisch einwandfrei

Durch das geschlossene System wird die Anwendungslösung vor Kontaminationen geschützt. Somit ist eine der wesentlichen Anforderungen an die hygienisch einwandfreie desinfizierende Reinigung von Flächen erfüllt.

✓ Leicht transportierbar

Die Feuchttuchspender können einfach und ohne Verschüttungsgefahr transportiert werden. Sie eignen sich auch hervorragend zum Transport auf dem Pflegewagen.



Das Spendersystem – typische Einsatzgebiete

Im täglichen Arbeitsablauf besteht für das Pflegepersonal häufiger die Notwendigkeit, gezielt desinfizierende Reinigungsmaßnahmen durchzuführen. D-Wipes sind schnell verfügbar, leicht zu transportieren und haben als Einmaltücher den großen Vorteil des verringerten Kontaminationsrisikos.

Typische Beispiele sind:

Bewohnerzimmer

Desinfizierende Reinigung von Oberflächen nach dem Waschen, oder nach dem Abräumen des Geschirrs.

Fäkalspüraum

Schnelles und effizientes Entfernen von Verschmutzungen.

Dienstzimmer

Desinfizierende Reinigung von Arbeitsflächen, die für die Vorbereitung von Medikamenten und zum Aufziehen von Injektionslösungen genutzt werden.



Das Spendersystem - platzsparende Wandhalterungen

Für die Feuchttuchspender sind praktische abschliessbare Wandhalterungen erhältlich, die leicht an Wänden oder Schränken zu montieren sind. Durch die Montage ist eine platzsparende Alternative zum Abstellen der Feuchttuchspender z. B. auf Arbeitsflächen gegeben.



D-WIPES richtig befüllt



1. Aus Personalschutzgründen und zum Schutz der Vliesrolle vor Kontamination empfehlen wir einen Schutzkittel sowie feste, chemikaliendichte Handschuhe.



2. Vliesrolle aus der Verpackung nehmen und in den Feuchttuchspender einsetzen.



3. Je nach gewünschter Feuchtigkeit der Tücher 2,5 - 3 Liter (100-Blatt-Rolle) oder 1 - 1,5 Liter (50-Blatt-Rolle) gebrauchsfertige Desinfektionsmittellösung langsam in den Feuchttuchspender einfüllen.



4. Das erste Tuch aus der Mitte der Tuchrolle herausziehen und den vorderen Teil des Tuches durch das sternförmige Entnahmesystem führen.

5. Den Deckel des Feuchttuchspenders verschließen.



6. Den Schutzdeckel des Entnahmesystems verschließen. Um das herausgezogene Tuch vor Austrocknung zu schützen, muß es vollständig vom Schutzdeckel umschlossen sein.



7. Der befüllte Feuchttuchspender ist einsatzbereit, wenn alle Tücher durchtränkt sind. Dies ist ca. 60 Min. nach Einfüllen der Desinfektionsmittellösung der Fall.



8. Beigefügtes Chargenetikett aufkleben und Produktname, Anwendungskonzentration, Einwirkzeit, Chargennummer sowie Ansatz- und Verfalldatum eintragen.



Wiederbefüllen und richtige Kennzeichnung

Der Feuchttuchspender ist selbstverständlich wiederverwendbar. Vor der Wiederbefüllung sollten Sie den Spender gründlich manuell oder in der Spülmaschine reinigen. Bei Wiederbefüllung mit dem gleichen Produkt kann die Reinigung mit diesem erfolgen. Wechseln Sie das Produkt, sollte ein Reiniger auf der Basis von nichtionogenen Tensiden eingesetzt werden.

Beim Nachfüllen ist es wichtig, das alte Chargenetikett zu erneuern und mit

- Namen des Desinfektionsmittels
- Anwendungskonzentration
- Einwirkzeit
- Charge
- Ansatz- und Verfalldatum

zu beschriften.

Ein neues Etikett liegt jeder D-WIPES ROLLE bei.





Die Präparate – einsetzbar in Verbindung mit den D-WIPES

Flächendesinfektion/-reinigung

BIGUAMED® PERFEKT N

- Kombinationspräparat zur Reinigung und Desinfektion
- universell einsetzbar
- aldehydfrei
- DGHM/VAH und DVG gelistet



DESOTOP

- Kombinationspräparat zur Reinigung und Desinfektion
- exzellente Reinigungseigenschaften
- aldehydfrei
- DGHM/VAH und DVG gelistet



DESOMED® Perfekt

- Kombinationspräparat zur Reinigung und Desinfektion
- umfassendes Wirkungsspektrum
- aldehydhaltig
- DGHM/VAH und RKI gelistet



Schnelldesinfektion

DESOMED® RAPID AF

- gebrauchsfertige, alkoholische Schnelldesinfektion
- mit Lemonduft oder parfümfrei erhältlich
- aldehydfrei
- DGHM/VAH-gelistet



DESOMED® RAPID UNIVERSAL

- gebrauchsfertige, alkoholfreie Schnelldesinfektion
- besonders gut geeignet für Acrylglas
- hoher Reinigungseffekt
- DGHM/VAH-gelistet



DESOMED® RAPID PUR

- gebrauchsfertige, alkoholische Schnelldesinfektion
- sehr gut geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich
- rückstands- und parfümfrei
- DGHM/VAH- und DVG-gelistet



Deutschland:

DESOMED
Dr. Trippen GmbH

Postfach 5325
D-79020 Freiburg

Tel. +49 1805-704010
Fax +49 1805-8747736

Internet: www.desomed.de
e-mail: info@desomed.de

Schweiz:

DESOMED AG

Mühlemattstraße 25
CH-4104 Oberwil

Tel. +41 61-4015490
Fax +41 61-4015237

Internet: www.desomed.ch
e-mail: info@desomed.ch